



BSE診断用ELISAキット

ニッピブル® BSE検査キットⅡ

牛延髄における異常プリオン蛋白質の検出キット

動物用体外診断用医薬品

28動薬第2952号

ニッピブル® BSE検査キットⅡ (96回用)

NippiBL® BSE Test Kit II (for 96 samples)

定価: ¥270,000



動物用体外診断用医薬品
28動薬第2952号

Store at
2-8℃
禁・凍結
Do not freeze.

〔前処理用 試薬セット 構成〕

- | | | | |
|------------------------------|----------|-----------------------|--------------|
| ① 試薬A (破碎用緩衝液) | 100mL 1本 | ⑥ 標識抗体用希釈液 | 12mL 1本 |
| ② 試薬B (プロテイナーゼK) | 1mL 1本 | ⑦ 陽性コントロール | 4ng (2mL) 1本 |
| ③ 試薬C (マイクロリアルタイムPCR用) | 1mL 1本 | ⑧ 陰性コントロール | 3mL 1本 |
| ④ 抗体プレート | 1枚 | ⑨ 基質液 | 15mL 1本 |
| ⑤ 標識抗体溶液 | 0.4mL 1本 | 付属品: プレートカバーシール | 4枚 |

ニッピ ELISA試薬・前処理器材セット

Nippi ELISA Reagents and Pretreatment Equipment Set

定価: ¥90,000



Store at
1-30℃

〔構成〕

- | | |
|--------------------------------|------|
| 反応停止液 | 15mL |
| 濃縮洗浄液 | 70mL |
| バイオマッシャー (破碎棒+フィルターチューブ) | 93組 |
| 回収用チューブ (ジルコニア製ボール入り) | 93個 |

BioMasher®
PAT.3853794

▶ コンパクトなパッケージになりました。

▶ 冷蔵のキットとELISA試薬・前処理器材を別のパッケージにすることにより冷蔵スペースの節約になります。

BSE診断用ELISAキット ニッピブル[®] BSE検査キットⅡ

牛延髄における異常プリオン蛋白質の検出キット

動物用体外診断用医薬品

28動薬第2952号

BioMasher[®]


PAT.3853794

破碎器具「バイオマッシャー[®]」を使用することにより、
破碎作業が安全、簡便に行えます。

ワンポット前処理法



1本のチューブで前処理が完結。
安全性を高め簡便化・迅速化を
実現しました。

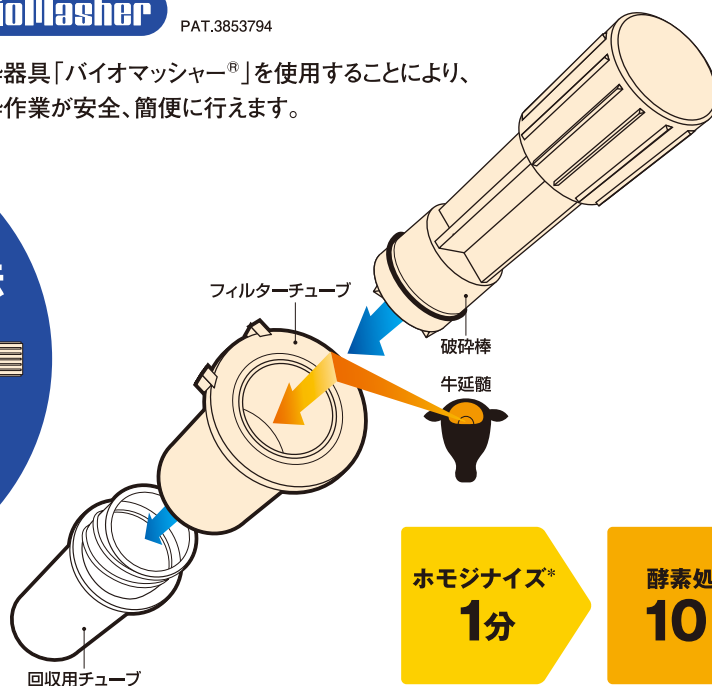

前処理時間

21分※

※チューブの開閉、移動、試薬添加の
時間は含みません。


ホモジナイズ*
1分

酵素処理
10分


加熱処理
10分

*遠心機 30秒+破碎機 30秒


ワンポット前処理法

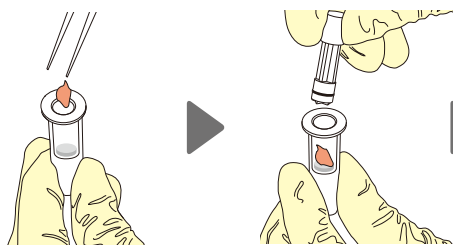


① バイオマッシャーに検査用組織を入れ、
破碎棒を挿入する。

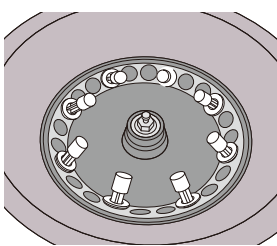


② 15,000G、30秒間の遠心操作を行う。

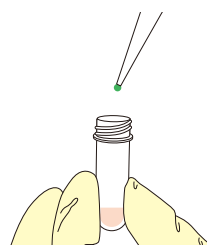


③ 酵素混合液を加える。

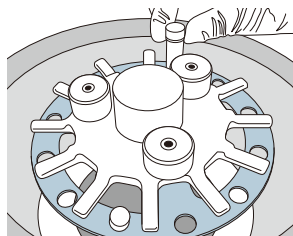

④ 30秒間の攪拌を行う。

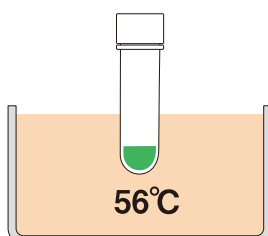

⑤ 56°C、10分間の酵素処理を行う。

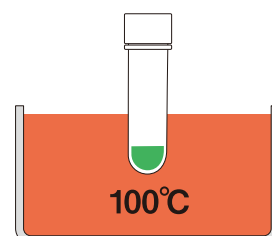

⑥ 100°C、10分間の熱処理を行う。

▶ 続いてELISA法による検出操作を行います。

製造元

nippi

株式会社

ニッピ

バイオ・ケミカル事業部

〒120-8601 東京都足立区千住緑町1-1-1 Tel.03-3888-5184

http://www.nippi-inc.co.jp E-mail:protein-info@nippi-inc.co.jp